

# BRAZALETES PARA TRATAMIENTOS SISTÉMICOS


Nuevas aplicaciones con Tecarterapia.



**RÖS'S**

Advanced technology for beauty and wellness professionals

Tecnología avanzada para profesionales de la estética y el wellness

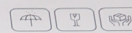

Evitar el contacto directo con la piel

Evitar el contacto directo con la piel

**RÖS'S**  
Tecnología avanzada



Los brazaletes sistémicos TECARpro amplían las posibilidades de aplicación de los dispositivos de transferencia eléctrica capacitiva y resistiva de RÖS'S.

Pensados para los especialistas en fisioterapia deportiva, rehabilitación músculo-esquelética y complementación en tratamientos de patologías inmunológicas, alcanza dos objetivos prioritarios para el profesional:

- **Mejorar los tiempos de recuperación gracias a la sinergia de energía y terapia manual.**
- **Innovar en tratamientos que hasta el momento no era posible realizar.**

Su dotación consta de un juego de brazaletes resistivos activos y un juego de brazaletes-retorno.

# Aplicaciones

## 1 APLICACIÓN MANOS LIBRES

OBJETIVO	TRATAMIENTOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimizar tiempos de trabajo ya que se aplican dos técnicas al mismo tiempo.</li><li>• Potenciar la terapia manual. Permite una aplicación más intensa, profunda y con mejor feedback por parte del paciente.</li><li>• Mejorar las sensaciones del profesional debido a la movilidad con la que cuenta.</li></ul>	<p><b>Aplicación recomendada en todo tipo de tratamientos con intervención de terapia manual.</b></p>	


Utilización de los brazaletes activos manos libres para trabajar técnica manual en sinergia con la energía y de los brazaletes de retorno para cerrar circuito en el área de trabajo.

## 2 APLICACIÓN TRANSARTICULAR

OBJETIVO	TRATAMIENTOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Focalizar la energía especialmente en zonas donde la placa de retorno metálica no se adapta adecuadamente, evitando así dispersión de la energía y pérdida de eficacia.</li></ul>	<p><b>Aplicación recomendada para la recuperación de lesiones en articulaciones.</b></p> <p><b>Muy adecuada en pacientes con exceso de peso, casos en los que es conveniente acercar el retorno al electrodo activo.</b></p>	


Utilización de electrodos clásicos y de brazaletes de retorno para focalizar la energía sobre la zona tratada.

### 3 APLICACIÓN SISTÉMICA PASIVA ACTIVADORA

OBJETIVO	TRATAMIENTOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Activar la circulación de forma general o en un área específica en modo termia para mejorar la nutrición y oxigenación de la zona.</li><li>• Poder realizar un drenaje venoso y linfático en modo infratérmico en fases agudas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preparación antes del tratamiento en fase aguda.</li><li>• Calentamiento antes del ejercicio.</li></ul>	


Uso de brazaletes activos y de retorno para generar un activación integral sistémica.

### 4 APLICACIÓN SISTÉMICA PASIVA RELAJANTE

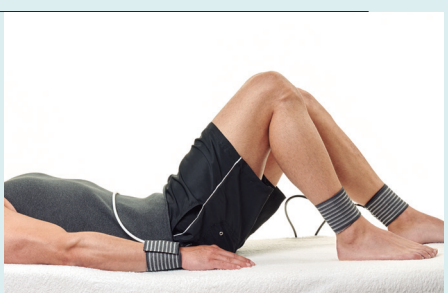OBJETIVO	TRATAMIENTOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tratamiento en modo Infratermia para conseguir una reequilibración celular en zonas con inflamación.</li><li>• Inducir de manera general hacia una febrícula. Se aplica en modo progresivo creciente, buscando un incremento de temperatura en modo de termia elevada.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Complemento en tratamientos del insomnio.</li><li>• Tratamiento en fases de dolor crónico como la artrosis.</li><li>• Mejora en patologías con origen inmunológico.</li></ul>	


Uso de brazaletes activos y de retorno para generar un activación integral sistémica.

### 5 APLICACIÓN SISTÉMICA ACTIVA ASISTIDA


OBJETIVO	TRATAMIENTOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Incrementar y potenciar los beneficios de la cinesiterapia y la terapia manual. El modo de aplicación dependerá del objetivo del tratamiento.</li></ul>	<p>Tratamientos en sinergia con terapia manual, como por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Movilizaciones</li><li>• Tratamientos miotendinosos</li><li>• Elastificaciones capsulares</li></ul>	

Uso de brazaletes activos por parte del terapeuta y de los brazaletes de retorno por parte del paciente.

### 6 APLICACIÓN SISTÉMICA ACTIVA NO ASISTIDA

OBJETIVO	TRATAMIENTOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Potenciar y mejorar el rendimiento de la ejercitación sin intervención activa del terapeuta.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Propiocepción.</li><li>• Ejercicios de rehabilitación.</li><li>• Entrenamientos y preparación deportiva.</li><li>• Sesiones preparatorias pre-cirugía.</li></ul>	

Uso de los brazaletes por parte del paciente a la vez que realiza el ejercicio.

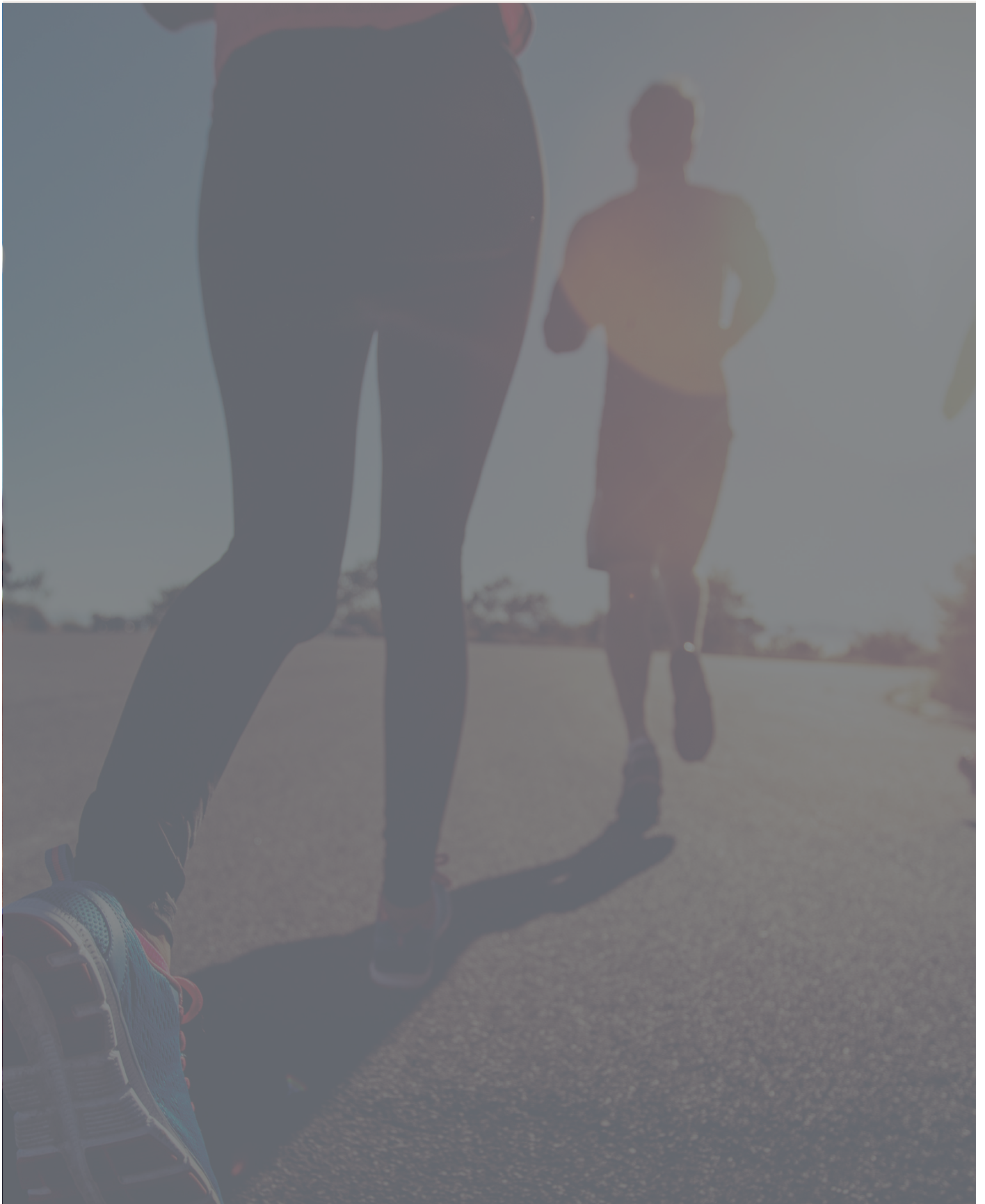

97C130E.CT.E.1B Pap30-10-2021



KIT SISTÉMICO BINARY PREMIUM / INTRADERMIK / TERMOBEAUTY  
Código 08BP060

ACCESORIO BRAZALETES RETORNO BINARY PREMIUM /  
INTRADERMIK / TERMOBEAUTY  
Código 08BP052

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD CONCEDIDO

**RÖS'S**  
Tecnología avanzada